

「感染したかも？」と思ったら



郵送検査サービスのご案内

梅毒トレポネーマ抗体


大切な人を守るため
自分で気軽に検査
しませんか

定価 4,400 円 (税込)

郵送検査セットA
(製品コード: 10101)


特長

独自開発の高感度検査

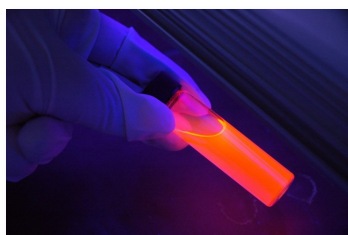

**感染早期に
判定できる**

特許申請中

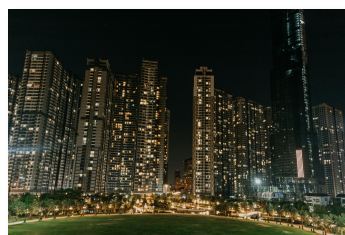

**いつでもどこでも
検査できる**

指先の少量の血液
を送るだけ



**誰にも知られず
検査ができる**

個人情報保護



**結果はWEBで
確認できる**

スマホなどで
素早く確認

たとえば、このようなときに利用できます

- ✓ 心配だけど、恥ずかしくて病院に行きづらい
- ✓ 仕事や生活の都合で、病院に行く時間がない
- ✓ 家族や恋人などに知られたくない
- ✓ 検査体制を整え、従業員に安心感を与えたい



ご利用方法

<https://lifetrek.co.jp/contracted-inspection-set>

(1)



検査セットのご購入

右記URLまたはQRコードからご購入ください。
お支払い方法は、銀行振込となります。



(2)



検査セットの配布

検査セットは、中身が見えない簡易パッケージでお送りします。
受け取られましたら、検査セットを利用者様にお渡しください。

(3)



検査物の採取

同封されている使用説明書にしたがって、
ご自身で指先から血液を採取してください。



(4)



検査物の返送

返送用封筒に採血チューブと使用済み器具をいれ、ポストに
投函してください。弊社到着後、検査を実施します。

(5)



検査結果の確認

保管用情報カードのIDとパスコードを使って、
ご自身で結果を確認してください。



留意事項

- 本商品は、梅毒に対する抗体の有無を判定し、通知するもので、医学的な確定診断を行うものではありません。医学的所見については、適切な医療機関の医師にご相談ください。
- 梅毒は症状が現れたり、消えたりすることがあります。また、症状がないこともあります。
- 過去に梅毒に感染したことがある場合、検査結果が陽性になる可能性があります。
- 感染の疑いのある日から1～2ヶ月経過していない場合には、検査結果が陰性となる可能性があります。
- 検査物の状態によっては、結果を得ることが出来ない場合があります。

郵送検査セットA (製品コード: 10101)

セット内容:

消毒綿、ばんそうこう、ランセットx2、圧迫用ゴム、
採血チューブ、返送用袋x2、保管用情報カード、
返送用封筒、使用説明書、注意事項

定価: 4,400 円/1セット (税込)

保存条件: 高温多湿を避け、常温で保存

ライフトレック株式会社

体外診断用医薬品製造業 (13EZ200060)

体外診断用医薬品製造販売業 (13E1X00073)

管理医療機器販売業 第1919号

〒 103-0016

東京都中央区日本橋小網町12-7

日本橋小網ビル4階

TEL: 03-6810-7526

FAX: 03-6810-7526

E-mail: service@lifetrek.co.jp

